

medi



サークエイド

ジャクスタキュア、ジャクスタライト、ジャクスタフィット
弾性ストッキングにおける新たなコンセプト

CIRCAID
by medi

サークエイド ラインナップ表

	ジャクスタキュア	ジャクスタライト	ジャクスタフィット
下肢			● 左脚用 ● 右脚用
大腿用			
下腿用	● 左右兼用	● 左右兼用	● 左右兼用 ● プレミアム(左右兼用)
上肢			● 左腕用 ● 右腕用
スリーブ			
ハンドラップ			● 左用 ● 右用
フットオプション		● アンクルフットラップL	● アンクルフットラップF ● PACバンドF ● インターロックフットラップF
アクセサリ			

ご注文に際して

① まず、各製品の必要箇所を採寸して下さい。
採寸値をもとに、カタログ記載の許容数値表から
丈・サイズを選んでください。

■採寸

<丈(長さ)>

丈(長さ) cm	ショート丈	ロング丈
LD	~44	44~

<周径>

周径 cm	S	M	M-W	L
eC	26~36	33~44	44~54	41~51
eB	19~22	22~27	22~27	25~32

	L-W	XL	XL-W	XXL
eC	51~61	37~48	48~61	53~64
eB	25~32	30~37	30~37	35~42

② 丈・サイズが決定したら、品番表から該当製品の品番
を見つけてください。

■品番

品番	サイズ	XXS	XS	S
エクストラショート丈		JU2979X	JU29791	JU29792
ショート丈		JU2974X	JU29741	JU29742
ロング丈		JU2904X	JU29041	JU29042

*一部製品には左右で品番が異なる場合や
フリーサイズのものがございます。
ご注意ください。

③ ご注文の際は ・製品名 ・品番 ・数量 の3点を指定してください。



<例>
ジャクスタフィット JU29742 2箱

ジャクスタキュア

Juxta-CURES

医療機器届出番号：27B1X00123CAMP10

<形状>



←レギンス下腿用
←コンプレッション
アンクレット

レギンスの下にはレッグ
ライナーを装着します。


■周径の変化に対応

- ・ジャクスタキュアは、浮腫の軽減などによる**下肢の周径変化にあわせて製品のサイズを調整**できます。(サイズアップには対応しかねます)
- ・サイズは、ベルクロ付パーツを移動させて調整します。
サイズ調整で余った生地はベルクロから5cm程離れた位置でカットします。

<使用例>

急性期など短期間にサイズダウンが考えられる場合
ドレッシング材の上から装着したい場合

- ・丈は、ショート/スタンダード/ロングの3種類からお選び下さい。
- ・フリーサイズ仕様ですが、周径許容値にはご注意ください。

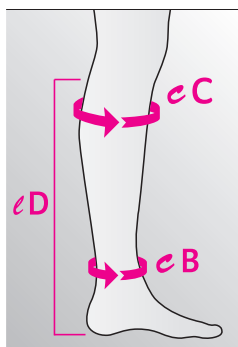

eD：膝下から踵までの丈

eC：ふくらはぎ周

eB：足首周

<丈(長さ)>

丈(長さ) cm	ショート	スタンダード	ロング
eD	~44	44~49	49~

<周径>

周径(許容値) cm	eC	eB
eC	25~64	フリーサイズ仕様ですが、周径が左記許容値内かご確認ください。
eB	19~42	

ふくらはぎと足首の周径値差が30cm以上ある場合は、本製品の適応外となりますので、ご注意ください。

品番	丈	ショート	スタンダード	ロング
	JU42709	JU42N09	JU42009	

・ジャクスタキュアは左右兼用です。

①



ベルクロ付パーツは本体に留めます

②



サイズ調整で余った生地はカットします
*定められた方法以外で本品をはきみて切るなど、加工・修理は行わないで下さい

③



レッグライナー・コンプレッションアンクレットの上から、レギンスを装着します

④



BPSカードで圧迫力を調整します
*圧迫力の調整は医師の指導のもと行ってください

■BPSカードで圧迫力の調整

- ・レギンス部の圧迫力は右写真のとおり、BPSカードを使用し調整が可能です。
<3段階に調整可能な圧迫力> (2.7~4.0kPa、4.0~5.3kPa、5.3~6.7kPa)
20-30mmHg、30-40mmHg、40-50mmHg

■さらに

- ・ベルクロを留めるだけなので、バンデージなどと比較し日々の着脱・管理が容易です。
- ・ジャクスタキュアは、ラテックスフリーです。
- ・通気性がよく、しなやかで快適な素材です(ブリス・オー・プレーン素材)。

■内容物

1. レギンス下腿用



ナイロン、ポリエチレンプラスチック
ポリウレタン、綿、スパンデックス

2. コンプレッションアンクレット



足背部分などにさらに圧迫をかけたい場合は別売のアンクルフットラップなど(P8)をご検討下さい

ナイロン、スパンデックス

3. レッグライナー




綿、ライクラ、マイクロバン

4. BPSカード



5. 補強用マジックテープ

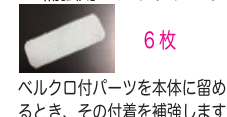

ベルクロ付パーツを本体に留めるとき、その付着を補強します

6. メジャリングテープ



★置き寸

ショート：28cm スタンダード：33cm ロング：38cm

*ご注文の際には、①製品名、②品番、③数量を指定してください。

ジャクスタライト

Juxta-Lite

医療機器届出番号：27B1X00123CAMP02

<形状>



←レギンス下腿用
←コンプレッション
アンクレット

レギンスの下にはレッグ
ライナーを装着します。


■より容易な装着

- ・従来の弾性ストッキングでは装着が困難な方に、新たな選択肢を提案します。ジャクスタライトは、ベルクロ付バンドを留めることで**容易に装着が可能**でいったん裏返してから履くといった動作も不要です。
- ・維持期など、周径値が比較的安定した段階での使用に適しています。
- ・丈は、ショート/ロングの2種類からお選び下さい。
- ・サイズはS~XXLです。
M、L、XLについては**ワイドタイプ(W)**もご用意しています。
- ・軽度伸縮性素材でしっかりと漸減的に圧迫し、静脈血のうっ滞軽減と、静脈還流の促進を図ります。



■採寸

<丈(長さ)>

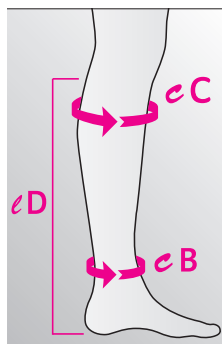

丈(長さ) cm	ショート丈	ロング丈
cD	~44	44~

<周径> ※ワイドタイプ(W)

周径 cm	S	M	M-W	L
cC	26~36	33~44	44~54	41~51
cB	19~22	22~27	22~27	25~32
	L-W	XL	XL-W	XXL
cC	51~61	37~48	48~61	53~64
cB	25~32	30~37	30~37	35~42

cD：膝下から踵までの丈

cC：ふくらはぎ周
cB：足首周

■品番

<左右兼用> ※ワイドタイプ(W)

品番	S	M	M-W
ショート丈	JU15702	JU15703	JU15713
ロング丈	JU15002	JU15003	JU15013
品番	L	L-W	XL
ショート丈	JU15704	JU15714	JU15705
ロング丈	JU15004	JU15014	JU15005
品番	XL-W	XXL	
ショート丈	JU15715	JU15706	
ロング丈	JU15015	JU15006	

・ジャクスタライトは左右兼用です。

■BPS カードで圧迫力の調整

- ・レギンス部の圧迫力は BPS カードを使用し調整が可能です。
(圧迫力の調整は医師の指導のもとで行ってください)
<3段階に調整可能な圧迫力> (2.7~4.0kPa、4.0~5.3kPa、5.3~6.7kPa)
20-30mmHg、30-40mmHg、40-50mmHg

■さらに

- ・ベルクロを留めるだけなので、バンデージなどと比較して日々の着脱・管理が容易です。
- ・ジャクスタライトは、ラテックスフリーです。
- ・通気性がよく、しなやかで快適な素材です(ブリース・オー・プレーン素材)。



■内容物

1. レギンス下腿用



ナイロン、ポリウレタン
銀、スパンデックス

2. コンプレッションアンクレット



足背部分などにさらに圧迫をかけた
場合は別売のアンクルフットラップ
など(P8)をご検討下さい

ナイロン、スパンデックス

3. レッグライナー



綿、ライクラ、マイクロン

4. BPS カード 1枚



BPS カードで圧迫力を調整します
*圧迫力の調整は医師の指導のもとで行
ってください。

★置き寸

ショート丈 : 28cm ロング丈 : 33cm

*ご注文の際には、①製品名、②品番、③数量を指定してください。


ジャクスタフィット

Juxta-Fit

医療機器届出番号：27B1X00123CAMP01

下肢 製品ラインナップ

- ・浮腫の軽減・下肢の全体的な漸減的圧迫に、すぐれた製品の登場です。軽度伸縮性の素材でしっかりと漸減的に圧迫し、浮腫の軽減や静脈還流を促進します。
- ・ジャクスタフィットは下腿用だけでなく**大腿用も展開**し、下肢の全体的な圧迫が可能になりました。
- ・丈は、ショート/ロングの2種類のほか、**大腿用はエクストラショート丈もご用意**しました。
- ・サイズは大腿用がXXS~XL、下腿用はS~XXLです。下腿用のM、L、XLについては**ワイドタイプ(W)**もご用意しています。
- ・通気性がよく、しなやかで快適な素材です（ブリース・オー・プレーン素材）。
- ・ジャクスタフィットは、ラテックスフリーです。

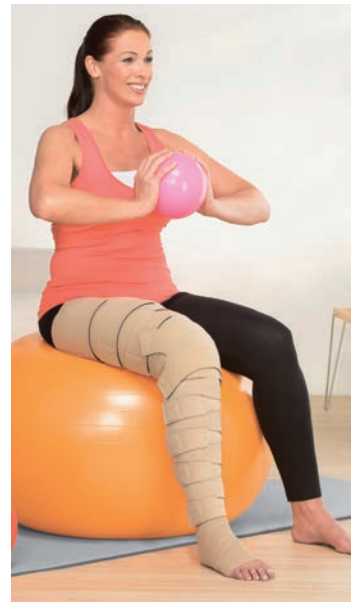

大腿用

<形状>
 ←レギンス大腿用
 ←ニーパッド

レギンスの下にはレッグライナーを装着します。
 レギンスの上には、必要に応じてカバーアップを装着します。



■採寸

<丈(長さ)> cE-G: 股下から膝蓋骨の中心までの丈

丈(長さ) cm	エクストラショート丈	ショート丈	ロング丈
cE-G	~33	33~43	43~

<周径> cG: 股下周 cE1: 膝上周(膝蓋骨中心から5cm上) cD: 膝下周

周径 cm	XXS	XS	S
cG	40~52	46~62	54~70
cE1	32~42	37~48	42~55
cD	23~30	27~35	31~41

周径 cm	M	L	XL
cG	60~80	69~90	77~101
cE1	50~65	58~76	66~87
cD	35~46	40~52	44~58

■内容物

- レギンス大腿用
- ニーパッド 各1枚
ナイロン、ポリウレタン、ライクラ、銀
- レッグライナー 2枚
綿、ライクラ、マイクロパン
- カバーアップ 1枚
ナイロン、スパンデックス
- BPS カード 1枚

■品番 *左右で品番が異なります。ご注文の際にはご注意ください。

<左脚用>

品番	XXS	XS	S
エクストラショート丈	JU2978X	JU29781	JU29782
ショート丈	JU2973X	JU29731	JU29732
ロング丈	JU2903X	JU29031	JU29032

品番	M	L	XL
エクストラショート丈	JU29783	JU29784	JU29785
ショート丈	JU29733	JU29734	JU29735
ロング丈	JU29033	JU29034	JU29035

<右脚用>



品番	XXS	XS	S
エクストラショート丈	JU2979X	JU29791	JU29792
ショート丈	JU2974X	JU29741	JU29742
ロング丈	JU2904X	JU29041	JU29042

品番	M	L	XL
エクストラショート丈	JU29793	JU29794	JU29795
ショート丈	JU29743	JU29744	JU29745
ロング丈	JU29043	JU29044	JU29045

*ご注文の際には、①製品名、②品番、③数量を指定してください。

★置き寸
 エクストラショート丈：35cm ショート丈：45cm ロング丈：55cm

下腿用

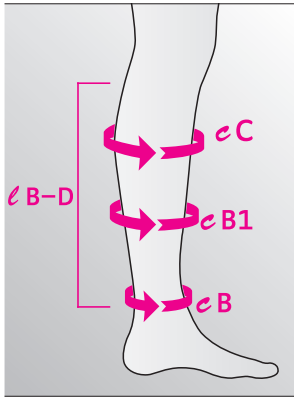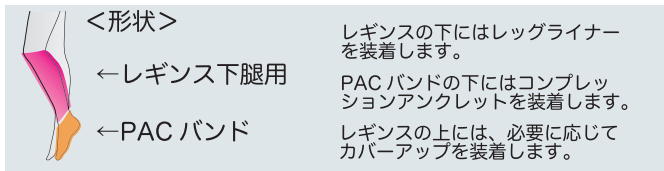

ℓ B-D：膝下から足首までの丈
 cC：ふくらはぎ周
 cB1：すね周 (cBから10cm上)
 cB：足首周

■内容物

- レギンス下腿用 1枚
ナイロン、ポリウレタン、ライクラ、銀
- PACバンド 1枚
ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレンプラスチック、ライクラ
- コンプレッションアンクレット 2枚
ナイロン、スパンデックス
- レッグライナー 2枚
綿、ライクラ、マイクロパン
- カバーアップ 1枚
ナイロン、スパンデックス
- BPSカード 1枚



■採寸

＜丈（長さ）＞

丈（長さ）cm	ショート丈	ロング丈
ℓ B-D	~36	36~

＜周径＞ ※ワイドタイプ(W)

周径 cm	S	M	M-W	L
cC	30~38	36~43	43~50	41~48
cB1	20~28	25~33	33~40	30~38
cB	15~23	20~28	20~28	25~33

	L-W	XL	XL-W	XXL
cC	48~56	41~51	51~61	53~64
cB1	38~46	33~41	41~51	43~53
cB	25~33	30~38	30~38	33~41

■品番

＜左右兼用＞ ※ワイドタイプ(W)

品番	ワイドタイプ(W)		
サイズ	S	M	M-W
ショート丈	JU25702	JU25703	JU25713
ロング丈	JU25002	JU25003	JU25013

サイズ	L	L-W	XL
ショート丈	JU25704	JU25714	JU25705
ロング丈	JU25004	JU25014	JU25005

サイズ	XL-W	XXL
ショート丈	JU25715	JU25706
ロング丈	JU25015	JU25006

*ご注文の際には、①製品名、②品番、③数量を指定してください。

★置き寸
 ショート丈 : 28cm ロング丈 : 36cm

■BPS カードで圧迫力の調整

- レギンス部の圧迫力は BPS カードを使用し調整が可能です。
 (圧迫力の調整は医師の指導のもと行ってください)
 ＜3段階に調整可能な圧迫力＞ (2.7~4.0kPa、4.0~5.3kPa、5.3~6.7kPa)
 20~30mmHg、30~40mmHg、40~50mmHg

■さらに

- ベルクロを留めるだけなので、バンデージなどと比較して日々の着脱・管理が容易です。
- ジャクスタフィットは、ラテックスフリーです。
- 通気性がよく、しなやかで快適な素材です (ブリース・オー・プレーン素材)。



- ・握力の低下などでご自身による弾性スリーブの装着が困難な方に、あらたな選択肢を提案します。
- ・軽度伸縮性の素材でしっかりと漸減的に圧迫し、浮腫の軽減や静脈還流を促進します。
- ・ジャクスタフィットの上肢製品は、アームスリーブのほかに、**ハンドラップも展開**しています（別売）。
- ・アームスリーブの丈は、ショート/ロングの2種類のほか、エクストラショート丈もご用意しました。
- ・サイズはアームスリーブがXS~XXL、ハンドラップはそれぞれXS~XLです。
- ・アームスリーブとハンドラップは、**左右それぞれ品番が異なります。**
- ・アームスリーブとハンドラップは、素肌に直接お使いいただけます。
- ・ジャクスタフィットは、ラテックスフリーです。



BPS カードを使用し圧迫力の調整が可能です。
 (圧迫力の調整は医師の指導のもと行ってください)
 <調整可能な圧迫力> (2.7~4.0kPa、4.0~5.3kPa)
 20~30mmHg、30~40mmHg

アームスリーブ

<形状>
 ←アームスリーブ

アームスリーブの上には、必要に応じてカバーアップを装着します。

ℓC-E : 手首から肘までの丈

cG : 上腕周
 cF : cE と cG の中間の周径
 cE : 肘周
 cD : 前腕周
 cC : 手首周



- 内容物
- ・アームスリーブ 1枚
ナイロン、ポリウレタン、ライクラ、絹
 - ・カバーアップ 1枚
ナイロン、スパンデックス
 - ・BPS カード 1枚

■採寸

<丈(長さ)>

丈(長さ) cm	エクストラショート丈	ショート丈	ロング丈
ℓC-E	~22	22~25	25~

<周径>

周径 cm	XS	S	M	L	XL	XXL
cG	28~32	30~34	32~37	35~40	38~44	42~48
cF	26~30	28~32	30~35	33~38	36~41	39~45
cE	25~28	27~30	29~32	31~34	33~36	36~40
cD	23~26	25~28	27~30	29~32	31~34	33~37
cC	15~17	17~19	19~21	21~23	23~25	25~28

*ご注文の際には、①製品名、②品番、③数量を指定してください。

★置き寸

エクストラショート丈 : 38cm ショート丈 : 43cm ロング丈 : 48cm

■品番 *左右で品番が異なります。ご注文の際にはご注意ください。

<左腕用>

品番	XS	S	M
エクストラショート丈	JU2A781	JU2A782	JU2A783
ショート丈	JU2A731	JU2A732	JU2A733
ロング丈	JU2A031	JU2A032	JU2A033


品番	L	XL	XXL
エクストラショート丈	JU2A784	JU2A785	JU2A786
ショート丈	JU2A734	JU2A735	JU2A736
ロング丈	JU2A034	JU2A035	JU2A036

<右腕用>

品番	XS	S	M
エクストラショート丈	JU2A791	JU2A792	JU2A793
ショート丈	JU2A741	JU2A742	JU2A743
ロング丈	JU2A041	JU2A042	JU2A043

品番	L	XL	XXL
エクストラショート丈	JU2A794	JU2A795	JU2A796
ショート丈	JU2A744	JU2A745	JU2A746
ロング丈	JU2A044	JU2A045	JU2A046

ハンドラップ

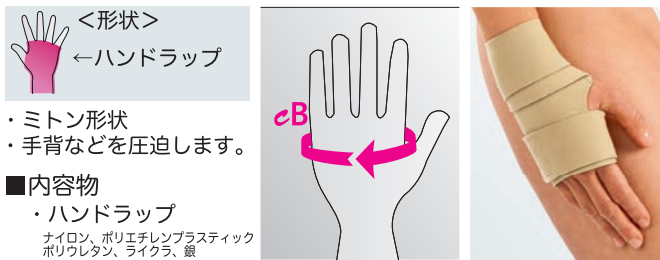

<形状>
←ハンドラップ

- ・ミトン形状
- ・手背などを圧迫します。

■内容物

- ・ハンドラップ
ナイロン、ポリエチレンプラスチック
ポリウレタン、ライクラ、銀

■採寸 cB：手背周

周径 cm	XS	S	M	L	XL
cB	14~17	17~20	20~23	23~26	26~29

■圧迫力：20mmHg (2.7kPa)

■品番 *左右で品番が異なります。ご注文の際にはご注意ください。

<左手用>

品番	XS	S	M	L	XL
左用	JU2B031	JU2B032	JU2B033	JU2B034	JU2B035

<右手用>

品番	XS	S	M	L	XL
右用	JU2B041	JU2B042	JU2B043	JU2B044	JU2B045

*ご注文の際には、①製品名、②品番、③数量を指定してください。

ジャクスタフィット

プレミアム 製品ラインナップ


医療機器届出番号：27B1X00123CAMP01

下腿用



<形状>
←レギンス下腿用
←PACバンド
レギンスの上に必要なに応じてカバーアップを装着します。

レギンスの下にはレッグライナーを装着します。
PACバンドの下にはコンプレッションアンクルレットを装着します。

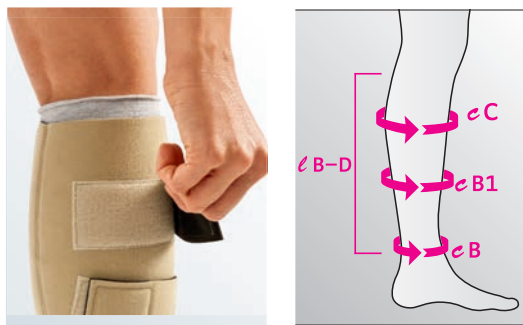

- ・より丈夫で高級なプレミアムラインをご用意しました。
- ・維持期など、周径値が比較的安定した段階での長期使用に適しています。

ℓ B-D：膝下から足首までの丈
cC：ふくらはぎ周
cB1：すね周 (cBから10cm上)
cB：足首周

■内容物

- ・レギンス下腿用 1枚
ナイロン、ポリエチレンプラスチック、ポリウレタン、スパンデックス、銀
- ・PACバンド 1枚
ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレンプラスチック、ライクラ
- ・コンプレッションアンクルレット 2枚
ナイロン、スパンデックス
- ・レッグライナー (シルバー) 2枚
綿、ナイロン、ライクラ、銀
- ・カバーアップ 1枚 ・BPSカード 1枚
ナイロン、スパンデックス

■BPSカードで圧迫力の調整

- ・レギンス部の圧迫力はBPSカードを使用し調整が可能です。
(圧迫力の調整は医師の指導のもと行ってください)
<3段階に調整可能な圧迫力> (2.7~4.0kPa、4.0~5.3kPa、5.3~6.7kPa)
20~30mmHg、30~40mmHg、40~50mmHg

■採寸

<丈(長さ)>

丈(長さ) cm	ショート丈	ロング丈
ℓ B-D	~36	36~

<周径> ※ワイドタイプ(W)

周径 cm	S	M	M-W	L
cC	30~38	36~43	43~50	41~48
cB1	20~28	25~33	33~40	30~38
cB	15~23	20~28	20~28	25~33
周径 cm	L-W	XL	XL-W	XXL
cC	48~56	41~51	51~61	53~64
cB1	38~46	33~41	41~51	43~53
cB	25~33	30~38	30~38	33~41

■品番

<左右兼用> ※ワイドタイプ(W)

品番	S	M	M-W
ショート丈	JU35702	JU35703	JU35713
ロング丈	JU35002	JU35003	JU35013

品番	L	L-W	XL
ショート丈	JU35704	JU35714	JU35705
ロング丈	JU35004	JU35014	JU35005

品番	XL-W	XXL
ショート丈	JU35715	JU35706
ロング丈	JU35015	JU35006

*ご注文の際には、①製品名、②品番、③数量を指定してください。

★置き寸 ショート丈：28cm ロング丈：36cm

フットオプション（別売）

下腿用の製品には、それぞれコンプレッションアンクレットが付属していますが、フット部分にさらに圧をかけたい場合は、下記製品を単体で販売しています

★インターロックフットラップF



- ・特にくるぶしに圧をかけたい場合などにおすすめです。
- ・足の周径にあわせたバンドの調整が可能です。

ナイロン、ポリエチレンプラスチック、ポリウレタン、ライクラ、銀

品番

	S	M	L
インターロックフットラップF	JU3I002	JU3I003	JU3I004

インターロックフットラップFの品番4桁目の"1"はアルファベットの「アイ」です。

★アンクルフットラップF



- ・オーソドックスなフットラップ。
- ・足背やくるぶしに圧をかけたい場合などにおすすめです。
- ・アンクルフットラップLより厚手です。

ナイロン、ポリエチレンプラスチック、ポリウレタン、ライクラ、銀

品番

	S	M	L
アンクルフットラップF	JU3W002	JU3W003	JU3W004

★PACバンドF



- ・足裏、特に土踏まずに圧をかけたい場合などにおすすめです。
- ・通気性がよく、かつ軽量です。
- ・靴が履きやすい形状です。

ナイロン、ポリウレタン、ライクラ、ポリエチレンプラスチック

品番

	S	L
PACバンドF	JU5P001	JU5P002

★アンクルフットラップL



- ・オーソドックスなフットラップ。
- ・足背やくるぶしに圧をかけたい場合などにおすすめです。
- ・アンクルフットラップFより薄手です。

ナイロン、ポリウレタン、ライクラ、銀

品番

	S	M
アンクルフットラップL	JU1W002	JU1W003

■採寸

<丈（長さ）>

●インターロックフットラップF、アンクルフットラップF PACバンドFは丈の採寸は不要です。

丈（長さ）	cm	S	M	L
ℓA-Y	共通	~9	~9	~9
ℓZ	インターロックフットラップFの場合	13~25	13~25	13~25
ℓZ	アンクルフットラップFの場合	~16	~16	~16


<周径>

●インターロックフットラップF、アンクルフットラップF

周径	cm	S	M	L
eB		~36	~36	~41
eH		19~24	24~29	29~34

●PACバンドF

周径	cm	S	L
eB		19~27	25~50
eH		19~36	22~41

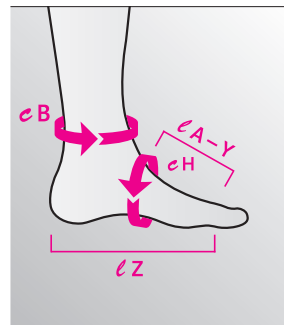

- ℓA-Y：足関節から中指付け根までの丈
- ℓZ：踵から親指付け根までの丈
- eB：足首周
- eH：足背周


*ご注文の際には、①製品名、②品番、③数量を指定してください。

アクセサリー（別売）

*ご注文の際には、①製品名、②品番、③数量を指定してください。

★カバーアップ


・レギンスやスリーブの上に装着して、ベルクロが衣服などに引っかかることを防止します。




ナイロン、スパンデックス

■採寸

下肢

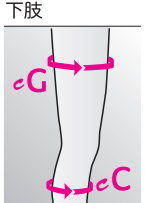

上肢



■品番

<下肢用>

品番	製品	サイズ	S	L
	下腿用・ブラック		JU5C7A2	JU5C7A4
	下腿用・ベージュ		JU5C7B2	JU5C7B4
	下肢全体・ブラック		JU5C0A2	JU5C0A4
	下肢全体・ベージュ		JU5C0B2	JU5C0B4

<上肢用>

品番	製品	サイズ	S	L
	上肢用・ベージュ		JU5U0B2	JU5U0B4
	上肢用・ピンク		JU5U0P2	JU5U0P4
	上肢用・ブラック		JU5U0A2	JU5U0A4

*ご注文の際には、①製品名、②品番、③数量を指定してください。

★ライナー

・レギンスやスリーブの下に装着し、製品をより快適にご使用いただけます。



<下肢用> *ライナーは全てフリーサイズです。

品番	形状	名称	ライクラ	コットン	シルバー
AD	下腿用・フット有		JULT709	JUCT709	JUST709
BD	下腿用・フット無		JULS709	—	JUSS709
AG	下肢全体・フット有		JULT009	JUCT009	JUST009
			綿、ライクラ	綿	綿、ナイロン ライクラ、銀


<上肢用> *ライナーは全てフリーサイズです。

品番	形状	名称	ライクラ	コットン	シルバー
AG	(アンダースリーブ)		JULV009	—	JUSV009
			綿、ライクラ	綿	綿、ナイロン ライクラ、銀

<下肢・上肢兼用>

品番	製品
	ノンスリップライナー
	ホワイト
	JU5R002


<素材>
ポリエステル



ノンスリップライナー

- 長方形：46cm × 152cm
- 必要な形状に切って製品の下に装着します。


★コンプレッションアンクレット



ナイロン、ポリウレタン

●コンプレッションアンクレット

品番	周径 cm	S	L
cB	19~27	25~50	
cH	19~36	22~41	

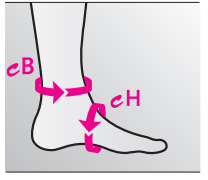

cB：足首周 cH：足背周

ご使用について

- ・ご使用の際は、必ず医師にご相談ください。
- ・製品に付属する添付文書、およびご使用のしおりもよくお読みください。
- ・製品の仕様、外観は改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
- ・印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。
- ・採寸は各部位の寸法が安定した状態で測定してください。
- ・下肢の製品は、足首周が製品サイズ選定の基準となります。
- ・上肢の製品は、手首周が製品サイズ選定の基準となります。

お手入れ方法

- ・水温40℃以下で市販の洗剤を溶かし、洗濯機または手で押し洗いしてください。
- ・洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットをご使用ください。
- ・柔軟剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニングアイロンがけはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色する場合がありますので、他の洗濯物との混入は避けてください。
- ・バンド部分のベルクロテープ（マジックテープ）は必ず留めた状態で洗濯してください。
- ・カバーアップとライナーはいたみやすい生地のため、単体で手洗いしてください。

サークエイド 価格表

ジャクスタキュア

医療機器届出番号：27B1X00123CAMP10

P.2▶ 片脚分 <1枚> 税込み価格 **23,100円** 税抜き価格 21,000円

ジャクスタライト

医療機器届出番号：27B1X00123CAMP02

P.3▶ 片脚分 <1枚> 税込み価格 **9,900円** 税抜き価格 9,000円

ジャクスタフィット

医療機器届出番号：27B1X00123CAMP01

P.4▶ 大腿用 片脚分 <1枚> 税込み価格 **27,170円** 税抜き価格 24,700円

P.5▶ 下腿用 片脚分 <1枚> 税込み価格 **24,750円** 税抜き価格 22,500円

P.6▶ アームスリーブ 片腕分 <1枚> 税込み価格 **27,720円** 税抜き価格 25,200円

P.7▶ ハンドラップ 片手分 <1枚> 税込み価格 **7,040円** 税抜き価格 6,400円

ジャクスタフィット プレミアム

医療機器届出番号：27B1X00123CAMP01

P.7▶ 片脚分 <1枚> 税込み価格 **37,070円** 税抜き価格 33,700円

フットオプション

P.8▶ インターロックフットラップF 片足分 <1枚> 税込み価格 **8,250円** 税抜き価格 7,500円

P.8▶ アングルフットラップF 片足分 <1枚> 税込み価格 **9,020円** 税抜き価格 8,200円

P.8▶ PACバンドF 片足分 <1枚> 税込み価格 **4,070円** 税抜き価格 3,700円

P.8▶ アングルフットラップL 片足分 <1枚> 税込み価格 **4,950円** 税抜き価格 4,500円

カバーアップ

P.9▶	下腿用 (1枚)	下肢全体 (1枚)	上肢用 (1枚)
税込み価格	2,860円	3,630円	2,420円
税抜き価格	2,600円	3,300円	2,200円

ライナー

P.9▶ 下肢用 (1双・2枚入り)

	ライクラ	コットン	シルバー
下腿用・フット有	税込み価格 4,070円 税抜き価格 3,700円	税込み価格 4,950円 税抜き価格 4,500円	税込み価格 4,950円 税抜き価格 4,500円
下腿用・フット無	税込み価格 3,300円 税抜き価格 3,000円	—	税込み価格 4,950円 税抜き価格 4,500円
下肢全体・フット有	税込み価格 4,510円 税抜き価格 4,100円	税込み価格 6,160円 税抜き価格 5,600円	税込み価格 6,160円 税抜き価格 5,600円

P.9▶ 上肢用 (1枚)

	ライクラ	コットン	シルバー
アンダースリーブ	税込み価格 2,860円 税抜き価格 2,600円	—	税込み価格 4,070円 税抜き価格 3,700円

P.9▶ 下肢・上肢兼用 (1枚)

ノンスリップライナー	税込み価格 7,370円	税抜き価格 6,700円
------------	--------------	--------------

コンプレッションアンクレット (2枚)

コンプレッションアンクレット	税込み価格 3,300円	税抜き価格 3,000円
----------------	--------------	--------------

取扱店

製造販売元 : ナック商会株式会社
 第1種医療機器 : 27B1X00123
 製造販売業許可番号 :
 URL : www.nakcorp.co.jp

■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-13
 (製造販売) tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-22-8
 tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956

お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390
大阪本社につながります

email : order@nakcorp.co.jp