

ジャクスタフィット 下腿用 ご使用のしおり

医療機器届出番号：27B1X00123CAMP01



■装着の手順 レギンス装着前に、レッグライナーおよびコンプレッションアンクレットを装着してください。



レギンスの黒い方を内側にして、まず上2つのバンドを留めます。



下から2つ目までのバンドを留めます。
※レギンス下部がくるぶし上部にあることをご確認ください。



続けて下からバンドを一本ずつ交互に留めていきます。
この時、折り目・しわ・隙間ができないように留めます。
※レギンス上部からレッグライナーが出る場合は、バンドを全て留めた後に、レギンス側に折り返してください。



付属のBPSカードの目盛りを基準に、各バンドの印に合わせ、圧迫力を調整します。
圧迫数値のメモリ内におさまるよう、正しく留め直してください。
圧迫力は、3段階に調整できます。
(20-30mmHg、30-40mmHg、40-50mmHg)
※圧迫力の調整は、医師の指導のもと行ってください。



30-40mmHgに正しく調整できています。

<例 30-40mmHg の場合>




もう少しキツく締めます。
(20mmHg 以下の圧力がかかっています)



キツく締めすぎています。
(50mmHg 以上の圧力がかかっています)

■PACバンド 装着の手順


レギンスを装着したら、次にPACバンドを装着します。

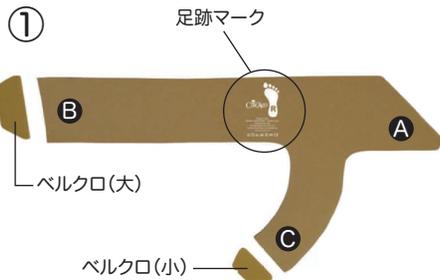


PACバンドを平らな床に広げ、右足なら「R」、左足なら「L」の足跡マークが見えるように置きます。



土踏まずを足跡マークの中央に置き、バンドAを足の甲に巻き、上からバンドBを巻きつけ、しっかりと適度な圧がかかっていることを確認します。そして、付属のベルクロ(大)で固定します。

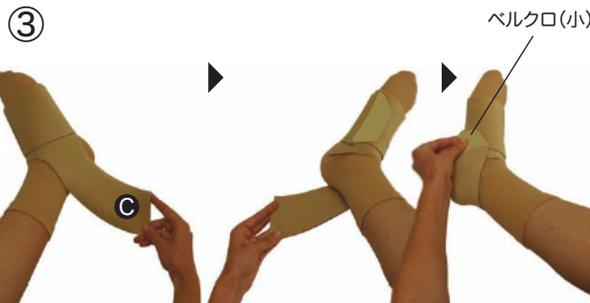

バンドCは、引っ張りながらかかとの後に巻きつけ、しっかりと適度な圧がかかっていることを確認します。そして、付属のベルクロ(小)で固定します。

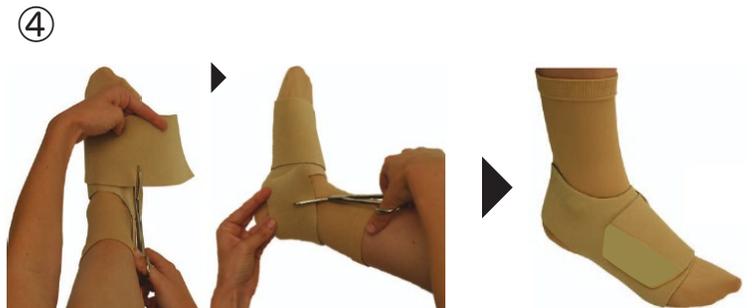

バンドが長い場合は、バンドB、または、Cを切って調節できます。
※本品をはさみで切る場合は、必ず医療従事者の指導のもと行ってください。

完成

■カバーアップ

必要に応じてレギンスの上から装着します。

滑かな素材でできているため、レギンスが体の他の部分を傷つけたり、他の生地をひっかけたりすることを防ぎます。



■内容物

1. レギンス下腿用 1枚
2. PACバンド 1枚
3. コンプレッションアンクレット 2枚
4. レグライナー 2枚
5. カバーアップ 1枚
6. B P S カード 1枚

装着の際の注意

- * 必要な圧迫力は、必ず医師にご相談ください。
- ・レギンス下部がくるぶし上部にくるよう装着してください。
- ・ベルクロを中に押し込まないでください。
- ・ベルクロが直接肌に触れないように装着してください。皮膚を傷つける原因となり得ます。

ご使用について

- ・ご使用の際は、必ず医師にご相談ください。
- ・ご使用のしおりのほかに、製品に付属する添付文書もよくお読みください。
- ・製品の仕様、外観は改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
- ・印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。
- ・返品・交換については、商品が未使用の場合には承ります。ただし、商品が未使用であっても、弊社の商品発送日から起算して30日を超えた場合の返品・交換は、承っておりません。ご了承ください。

お手入れ方法

- ・水温40℃以下で市販の洗剤を溶かし、洗濯機または手で押し洗いしてください。
- ・洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットをご使用ください。
- ・柔軟剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色・色移りする場合がありますので、他の洗濯物との混入は避けてください。
- ・バンド部分のベルクロ(マジックテープ)は必ず留めた状態で洗濯してください。
- ・カバーアップとレグライナーはいたみやすい生地のため、単体で手洗いしてください。

本しおりの内容は平成27年2月現在の内容です。

レギンスの脱ぎ方

- ・レギンスは一番上のベルトから順に外してください。
- ・外したベルクロは折り返して本体に留めてください。

※平成20年3月21日保医発第0321001号等により、一定の要件を満たすことを前提に、弾性着衣の購入は療養費支給の対象となりました。詳細は関係省庁や弊社までお問い合わせください。

製造販売元：ナック商会株式会社

第1種医療機器
製造販売業許可番号：27B1X00123
URL：www.nakcorp.co.jp
e-mail：order@nakcorp.co.jp

■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-1 3
(製造販売) tel：06-6599-9000 fax：06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-2-8
tel：03-5343-7955 fax：03-5343-7956

お客様相談・注文窓口：0120-06-0390