

メディエスプリ ご使用のしおり

mediven® esprit (medi product)

■メディエスプリの特徴

- ・ メディエスプリは、ドイツの医療用弾性ストッキングメーカー、メディ社(Medi GmbH & Co.KG)が開発し、ドイツ医療用品規格に準じて製造された製品です。
ドイツの検査機関である、ホーヘンシュタイン研究所の品質検査合格品(RALマーク付)です。
- ・ メディエスプリ(平編み)は6サイズ 3S~LL までご用意可能です。
弊社では、このような既製品のほかにもオーダーメイドも承っております。詳細はお問い合わせください。
- ・ スタイルはスリーブ(手首まで)、ミトン付きスリーブ(手背まで)、手袋(五指分離)の3タイプがあるほか、スリーブ・ミトン付きスリーブは、トップバンド付のものをご用意しています。また、左右どちらの腕・手にも使用できます。
- ・ スリーブと手袋を併用することにより、日常生活の不便が解消できます。

■ご使用に関して


- ・ 必ず医師にご相談の上、着用してください。
 - ・ 多汗性、脂性のお肌の方は、着用時に天花粉の使用をおすすめします。
 - ・ もし、スリーブにほつれ、糸切れ等が発生しても、その部分は切り取らないでください。伝線、穴あき等の原因になります。ご不明な点はお問い合わせください。
 - ・ 染料の性質上、汗や摩擦により、色落ちしたり、他のものに色移りする恐れがありますのでご注意ください。
- ★ 着用していて、シビレ、痛み、むくみ、腫れなどがある場合、また指先が青白くなったり、紫色に変色した場合、腕が発熱あるいは発赤した場合は、使用を直ちに中止し医師にご相談ください。

■洗濯方法

- ・ 手での押し洗いをおすすめします。もみ洗いは避けてください。
洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットをご使用の上、液温40℃以下でソフト洗いをしてください。
 - ・ よくすすいだ後、手で軽くしぼり、形を整えて陰干しにしてください。
 - ・ 乾燥機の使用、直射日光は生地を傷めることがあります。避けてください。
 - ・ 柔軟仕上げ剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
 - ・ 洗濯時に多少脱色することがありますので、他の洗濯物との混入はお避け下さい。
- ★ 軟膏、クリーム類を使用しているときは、一日一回、必ず洗ってください。


■メディエスプリの装着方法

1. スリーブの上部をあらかじめ手首の部分まで裏返してください。
2. 爪や指輪などでスリーブを引っ掛けないように注意し、スリーブに手を入れてください。
3. 裏返した部分を少しずつ引き上げてください。
この時、市販のゴム手袋などを使うとスリーブが引き上げやすくなります。
4. スリーブを腕全体に均等にのばし、しわ、たるみ、よじれができないように丁寧に装着してください。
5. 全体的にしわ、たるみができないように注意しながら、最終的にわきの下まで引き上げてください。

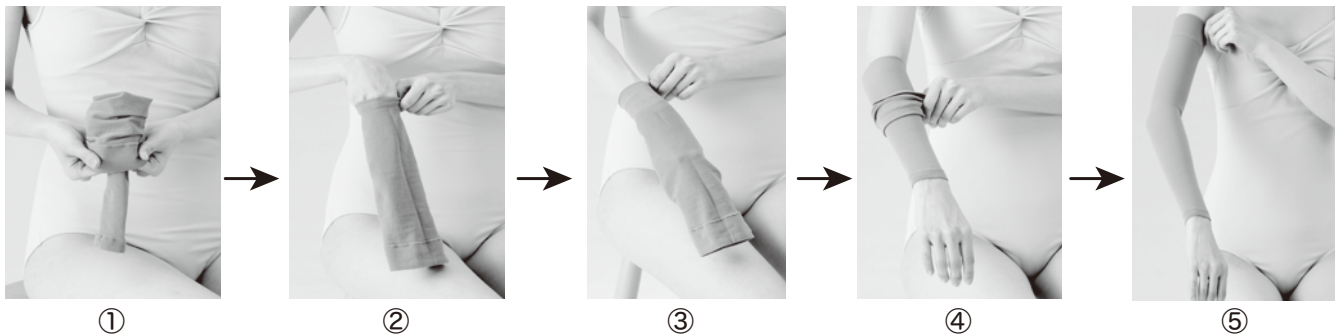

■メディエスプリの装着方法（補助器具を使用した場合）

1. 半円形に開いている部分を自分と反対側に向けて補助器具を置き、スリーブを補助器具に取り付けます。
2. フレームにスリーブを均等に広げ、スリーブの口に少しずつ腕を入れていきます。
3. 腕に入れていく過程で、補助器具が動かないように注意し、さらに深く入れていきます。
4. スリーブに腕がある程度深く入れば、補助器具からスリーブをゆっくり抜きます。
その後、スリーブにしわが残らないよう、全体にしわをのばします。
5. 全体的にしわ、たるみができないように注意しながら、最終的にわきの下まで引き上げてください。

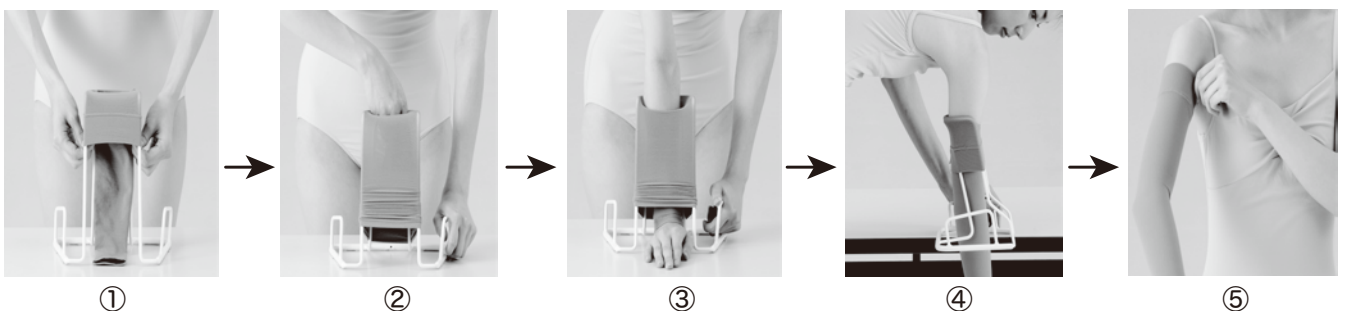

※写真で使用している装着補助器具はメディパトラ（ショートハンドル 900-2）です。
詳細は弊社までお問い合わせください。

*平成20年3月21日保医発第0321001号等により、一定の要件を満たすことを前提に、弾性着衣の購入は、療養費支給の対象となりました。詳細は、関係省庁や弊社までお問い合わせください。

ナック商会株式会社 URL : www.nakcorp.co.jp
e-mail : order@nakcorp.co.jp
■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-13
tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007
■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-2-8
tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956
お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390