



medi

medi メディ弾性スリーブ

メディハーモニー、メディエスプリ


本カタログは2021年3月現在の内容のものです。





## スタイル

\*弊社取り扱いのメディ社製品はすべて在庫限りとなります。  
ご注文の際は在庫確認をお願いいたします。

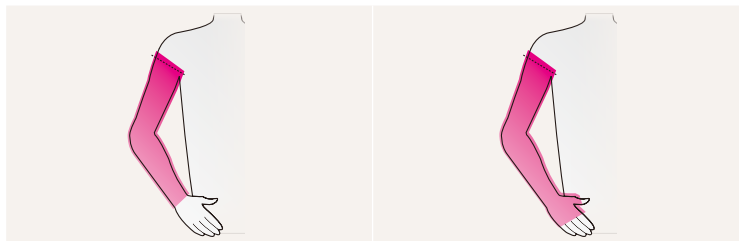

## メディハーモニー

mediven harmony (medi product)  
医療機器届出番号: 27B1X00123MEDI25

キャメル (#1)	ブラック (#5) *取り寄せ製品	メディベージュ (#8)
-----------	----------------------	--------------

★編み方: 丸編み(ミトン・手袋は平編み)

	サイズ	ワイドタイプ
スリーブ各種	SS ~ 4L	あり(常時在庫対象)
ミトン・手袋	S ~ 4L	なし

\*価格はスタンダードと同じ

素材	ラテックスフリーです	
圧迫クラス	ポリウレタン	ナイロン
圧1	34%	66%
圧2	43%	57%

ショート丈のラインナップは別途右の注意書きをご参照ください。→

メディハーモニー	ワイドをご注文の場合、品番の最後にWをつけてください。例 2Z10W	
圧迫クラス1 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	スリーブ	ミトン付スリーブ
品番 スタンダード丈	2Y00	2Y10
(税抜き価格)	(¥8,000)	(¥12,800)
税込み価格	¥ 8,800 /枚	¥ 14,080 /枚
圧迫クラス2 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	スリーブ	ミトン付スリーブ
品番 スタンダード丈	2Z00	2Z10
(税抜き価格)	(¥8,400)	(¥13,200)
税込み価格	¥ 9,240 /枚	¥ 14,520 /枚

## メディエスプリ

mediven esprit (medi product)  
医療機器届出番号: 27B1X00123MEDI21

キャメル (#1)
-----------

★編み方: 平編み

	サイズ
スリーブ各種	3S ~ LL
手袋	3S ~ LL

素材	ラテックスフリーです	
圧迫クラス	ポリウレタン	ナイロン
圧1	12%	88%
圧2	16%	84%

メディエスプリ		
圧迫クラス1 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	スリーブ	ミトン付スリーブ
品番	ショート丈	530T
	ロング丈	531T
535T	536T	
(税抜き価格)	(¥15,000)	(¥20,000)
税込み価格	¥ 16,500 /枚	¥ 22,000 /枚
圧迫クラス2 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	スリーブ	ミトン付スリーブ
品番	ショート丈	550T
	ロング丈	551T
555T	556T	
(税抜き価格)	(¥15,000)	(¥20,000)
税込み価格	¥ 16,500 /枚	¥ 22,000 /枚

## メディハーモニーの特徴

### ●楕円形加工(ダブルエリプス)

肘の内側・外側の2か所の楕円形加工は、肘周囲のシワの形成をおさえ、肘の屈伸時に生じる負担を軽減します。



肘の内側



肘の外側

### ●細部まで着け心地の良さを追求

ミトン部のシームを薄く仕上げ、着け心地の向上を図りました。トップバンド部のシームも同様に、薄く仕上げています。



ミトン付スリーブのミトン部



トップバンド



\*弊社取扱いのメディ社製品はすべて在庫限りとなります。  
ご注文の際は在庫確認をお願いいたします。



ミトン・手袋にワイドタイプはございません。

ショート丈は、キャメル色のみでサイズはSS~LLまでとなります

ミトン	手袋(指加圧タイプ)	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付
2Y20	2Y21	ショート丈 2Y31	ショート丈 2Y41
		スタンダード丈 2Y01	スタンダード丈 2Y11
(¥8,000)	(¥16,000)	(¥10,000)	(¥15,500)
¥ 8,800 /枚	¥ 17,600 /枚	¥ 11,000 /枚	¥ 17,050 /枚
ミトン	手袋(指加圧タイプ)	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付
2Z20	2Z21	ショート丈 2Z31	ショート丈 2Z41
		スタンダード丈 2Z01	スタンダード丈 2Z11
(¥8,000)	(¥17,000)	(¥10,400)	(¥16,000)
¥ 8,800 /枚	¥ 18,700 /枚	¥ 11,440 /枚	¥ 17,600 /枚

	手袋(指加圧タイプ)	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付
	532	530	535
		531	536
	(¥18,000)	(¥15,000)	(¥20,000)
	¥ 19,800 /枚	¥ 16,500 /枚	¥ 22,000 /枚
	手袋(指加圧タイプ)	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付
	552	550	555
		551	556
	(¥18,000)	(¥15,000)	(¥20,000)
	¥ 19,800 /枚	¥ 16,500 /枚	¥ 22,000 /枚

## メディエスプリの特徴

### ●お肌にやさしく、伸縮性にすぐれた生地(丸編み)

柔らかく快適な着け心地です。  
ラノリンが含まれ、お肌にもやさしい生地です。

メディハーモニーは、より伸縮性にすぐれた生地を使用しています。1つの製品で、従来のショート・ロング丈許容数値を、おおよそカバーします。



### ●丈夫な平編み

厚手の生地なのに柔らかく、  
着け心地が快適です。  
食い込みにくく、しっかりと  
圧がかかります。




### ●使いやすさ

メディハーモニーは、より身体のラインに沿うようデザインし、  
幅広のワイドタイプもご用意しました。  
それによって、よりフィットする製品を選びやすくなりました。

\*弊社取扱いのメディ社製品はすべて在庫限りとなります。  
ご注文の際は在庫確認をお願いいたします。

# メディバトラー

medi Butler 弾性スリーブ装着の補助器具

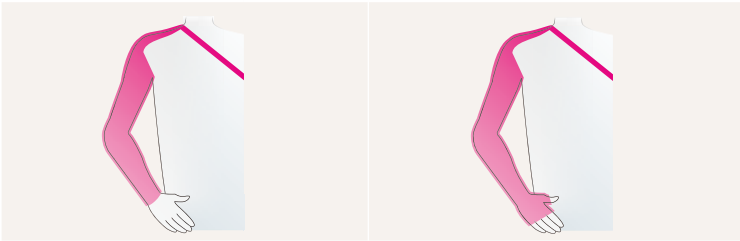

スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付	ミトン付スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付
<b>2Y05</b>	<b>2Y15</b>
(¥11,000)	(¥15,500)
¥12,100 /枚	¥17,050 /枚
スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付	ミトン付スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付
<b>2Z05</b>	<b>2Z15</b>
(¥11,400)	(¥16,000)
¥12,540 /枚	¥17,600 /枚

## アームバトラー

- ・品番 900 - 10
- ・税込み価格 ¥16,500  
(税抜き価格 ¥15,000)



## エクスポート ロングハンドル

- ・品番 900 - 7
- ・税込み価格 ¥8,360  
(税抜き価格 ¥7,600)
- リーズナブルな価格で  
スリーブにも使用可能。



販売終了

### <メディハーモニー ショート丈>

下記の展開のみとなります

- ・スタイル：①スリーブ トップバンド付  
②ミトン付スリーブ トップバンド付
- ・サイズ：SS~LL
- ・カラー：キャメル
- ・ワイドタイプも常時在庫で展開しています

## ご注文の方法

- ・ご注文の際には、①品番、②カラー  
③サイズ、④数量をご明記下さい。



- ① 圧迫クラスとスタイルから品番を選びます。  
例：2Y00

メディハーモニー 圧迫クラス1 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	スリーブ
品番	<b>2Y00</b>
(税抜き価格)	(¥8,000)
税込み価格	¥8,800/枚

- ② サイズ表からご自身にあったサイズを選びます。  
例：Sサイズ

スタンダード		
周径(cm)	SS (I)	S (II)
eG	23.5 - 25.5	28.0 - 30.5
eF	23.5 - 25.5	25.0 - 27.5
eE	23.0 - 25.0	24.5 - 26.5
eD	22.0 - 24.0	23.0 - 25.0
eC1	15.0 - 16.5	16.5 - 18.0
eC	13.5 - 14.5	14.5 - 15.5
eA	15.0 - 18.0	16.0 - 19.0

ワイドタイプをご注文の場合は品番の後ろにWもあわせて表記してください。  
例：2Y00W Sサイズ

- ③ お好みのカラーを選びます。  
例：メディベージュ(#8)  
(ブラックは取り寄せ製品です)

キャメル (#1)	ブラック (#5) *取り寄せ製品	メディベージュ (#8)
--------------	-------------------------	-----------------

- ④ 数量をご明記ください。

### メディ弾性スリーブの装着方法

#### ステップ1

スリーブの上部をあらかじめ手首の部分まで裏返して、スリーブ先端を手首にあわせませす。爪や指輪などでスリーブを傷つけないようご注意ください。



#### ステップ2

裏返した部分を少しずつ引き上げます。メディハーモニーの場合、引き上げは肘の楕円形加工部分が肘関節の内・外側に重なるよう調整しながら行います。



#### ステップ3

全体的にシワ、たるみがないことを確認しながら、わきの下まで均等に引き上げてください。



### メディ弾性スリーブの装着方法(補助器具を使用した場合)

#### ステップ1

半円形に開いている部分を自分と反対側に向けて補助器具を置き、スリーブを裏返して補助器具に取り付けます。



#### ステップ2

補助器具にスリーブを均等に広げ、スリーブの口に少しずつ腕に入れていきます。



#### ステップ3

腕を入れていく過程で、補助器具が動かないよう注意し、さらに深く入れていきます。



#### ステップ4

スリーブに腕がある程度深く入れば、補助器具からスリーブをゆっくり引き抜きます。その後スリーブにシワが残らないよう、全体にシワをのばします。



#### ステップ5

全体的にシワ、たるみがないことを確認しながら、わきの下まで均等に引き上げてください。




☆メディバトラーの詳細は弊社までお問い合わせください。


# サイズ表(手袋、ミトン)

\*弊社取扱いのメディ社製品はすべて在庫限りとなります。  
ご注文の際は在庫確認をお願いいたします。

## ●周径の採寸

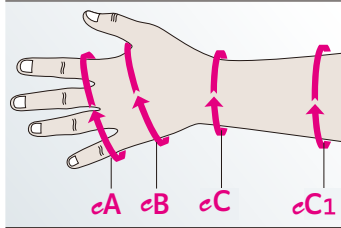

eC1 eCより5cm近位  
eC 最も細い部位の周径(手首周)  
eB 手背周  
eA 親指以外の4指のつけ根の周径

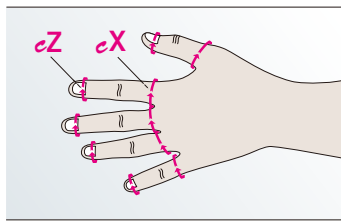

eZ 爪床部の周径  
eX 指の付け根の周径


## メディハーモニー ・サイズ展開：S~4L ミトン・手袋にワイドタイプはございません。

周径 (cm)						
サイズ	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)	3L (VI)	4L (VII)
eC1	15,0 - 18,0	17,0 - 20,0	19,0 - 21,5	21,0 - 23,5	23,0 - 26,0	25,5 - 30,0
eC	13,5 - 15,5	15,0 - 18,0	17,0 - 20,0	19,0 - 21,0	20,0 - 23,5	22,5 - 27,5
eB	15,5 - 20,0	17,5 - 21,0	19,5 - 23,0	20,5 - 24,0	22,5 - 26,0	24,5 - 30,0
eA	15,0 - 19,0	17,0 - 20,0	19,0 - 22,0	20,0 - 23,0	22,0 - 25,0	24,0 - 29,0
周径 (cm) 5指の周径はあくまでも目安です。この数値から大きくはずれていないかご確認下さい。						
サイズ	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)	3L (VI)	4L (VII)
親指	eX 7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0
	eZ 6,0	6,5	6,5	7,0	7,5	8,0
人差し指	eX 6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	eZ 5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
中指	eX 6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	eZ 5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
薬指	eX 6,0	6,5	7,0	7,0	7,5	9,0
	eZ 5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,5
小指	eX 5,5	6,0	6,0	6,5	7,0	8,0
	eZ 4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	6,0


## メディエスプリ ・サイズ展開：3S~LL

周径 (cm)						
サイズ	3S	SS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)
eC1	13,5 - 16,0	15,5 - 18,0	17,5 - 20,0	19,5 - 22,0	21,5 - 24,0	23,5 - 26,0
eC	13,0 - 15,0	15,0 - 17,0	17,0 - 19,0	19,0 - 21,0	21,0 - 23,0	23,0 - 25,0
eB	16,0 - 19,0	18,0 - 21,0	20,0 - 23,0	22,0 - 25,0	24,0 - 27,0	26,0 - 29,0
eA	15,0 - 18,0	17,0 - 20,0	19,0 - 22,0	21,0 - 24,0	23,0 - 26,0	25,0 - 28,0
周径 (cm) 5指の周径はあくまでも目安です。この数値から大きくはずれていないかご確認下さい。						
サイズ	3S	SS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)
親指	eX 6,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
	eZ 4,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
人差し指	eX 5,0	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
	eZ 4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
中指	eX 5,0	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
	eZ 4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
薬指	eX 4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
	eZ 3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
小指	eX 4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
	eZ 3,0	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5

## ●丈の採寸 丈の許容値はあくまでも目安です。この数値から大きくはずれていないかご確認下さい。

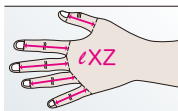

丈 / 手指 (cm)	メディエスプリ			メディハーモニー
サイズ	3S ~ SS (I)	S (II) ~ L (IV)	LL (V)	全サイズ共通
親指	3,5	4,0	4,5	3,5 - 4,5
人差し指	4,5	5,0	5,5	4,5 - 5,5
中指	5,5	6,0	6,5	5,5 - 6,5
薬指	4,5	5,0	5,5	4,5 - 5,5
小指	3,5	4,0	4,5	3,5 - 4,5

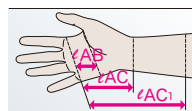


丈 (cm)	メディエスプリ		メディハーモニー
サイズ	3S ~ S (II)	M (III) ~ LL (V)	全サイズ共通
eAB	3,5	4,0	3,5 - 4,5
eAC	9,5	10,0	10,0 - 12,0
eAC1	14,0	15,0	15,0 - 16,0

# サイズ表(スリーブ各種)

\*弊社取り扱いのメディ社製品はすべて在庫限りとなります。  
ご注文の際は在庫確認をお願いいたします。

## ●周径の採寸

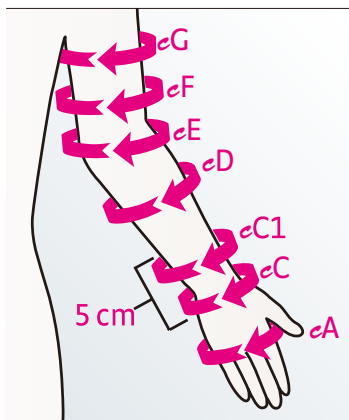

- eG 腋の下の周径(上腕周)
- eF eEとeGの中間の周径
- eE 肘を少し曲げたときの周径(肘周)
- eD 前腕で最も太い部位の周径
- eC1 eCより5cm近位
- eC 最も細い部位の周径(手首周)
- eA 親指以外の4指のつけ根の周径

## メディハーモニー

### スタンダード

- ・サイズ展開：SS~4L 各サイズにワイドタイプをご用意(価格はスタンダードと同じ)
- ・ショート丈：SS~LL 各サイズにワイドタイプをご用意(価格はスタンダードと同じ)

周径(cm)	SS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)	3L (VI)	4L (VII)
eG	25,5 - 28,0	28,0 - 30,5	30,0 - 33,0	32,0 - 35,0	33,5 - 36,5	36,0 - 39,5	38,0 - 41,5
eF	23,5 - 25,5	25,0 - 27,5	27,5 - 30,0	29,5 - 32,0	31,0 - 34,0	33,0 - 36,0	35,0 - 38,5
eE	23,0 - 25,0	24,5 - 26,5	26,0 - 28,5	27,5 - 30,0	29,5 - 31,5	30,5 - 33,5	32,5 - 35,5
eD	22,0 - 24,0	23,0 - 25,0	24,0 - 26,0	25,0 - 27,5	27,0 - 29,5	28,5 - 31,0	30,5 - 33,5
eC1	15,0 - 16,5	16,5 - 18,0	18,0 - 19,5	19,5 - 21,0	21,0 - 23,0	23,0 - 25,0	25,0 - 27,5
eC	13,5 - 14,5	14,5 - 15,5	16,0 - 17,5	17,5 - 19,0	19,0 - 20,5	20,5 - 22,5	22,5 - 24,5
eA	15,0 - 18,0	16,0 - 19,0	17,0 - 20,0	19,0 - 22,0	20,0 - 23,0	22,0 - 25,0	24,0 - 27,0

### ワイド

ワイドをご注文の場合、品番の最後にWをつけてください。例 2Z10W (価格はスタンダードと同じ)


周径(cm)	SS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)	3L (VI)	4L (VII)
eG	28,5 - 31,0	30,5 - 33,5	33,0 - 36,0	35,0 - 38,5	37,0 - 40,5	39,5 - 43,0	41,5 - 45,5
eF	25,5 - 28,0	27,5 - 30,0	30,0 - 33,0	32,0 - 35,0	34,0 - 37,0	36,0 - 39,5	38,5 - 42,0
eE	24,0 - 26,0	26,5 - 29,0	28,5 - 31,0	30,0 - 33,0	31,5 - 34,5	33,5 - 36,5	35,5 - 39,0
eD	24,0 - 26,0	25,0 - 27,5	26,0 - 28,5	28,0 - 30,5	29,5 - 32,0	31,0 - 34,0	33,5 - 36,5
eC1	15,0 - 16,5	16,5 - 18,0	18,0 - 19,5	19,5 - 21,0	21,0 - 23,0	23,0 - 25,0	25,0 - 27,5
eC	13,5 - 14,5	14,5 - 15,5	16,0 - 17,5	17,5 - 19,0	19,0 - 20,5	20,5 - 22,5	22,5 - 24,5
eA	15,0 - 18,0	16,0 - 19,0	17,0 - 20,0	19,0 - 22,0	20,0 - 23,0	22,0 - 25,0	24,0 - 27,0

## メディエスプリ

- ・サイズ展開：3S~LL

周径(cm)	3S	SS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)
eG	26,0 - 30,0	28,0 - 32,0	30,0 - 34,0	32,0 - 37,0	35,0 - 40,0	38,0 - 44,0
eE	23,0 - 25,5	25,0 - 27,5	27,0 - 29,5	29,0 - 32,0	31,0 - 34,0	33,0 - 37,0
eC	13,0 - 15,0	15,0 - 17,0	17,0 - 19,0	19,0 - 21,0	21,0 - 23,0	23,0 - 25,0
eA	15,0 - 18,0	17,0 - 19,0	18,0 - 20,0	19,0 - 22,0	21,0 - 24,0	23,0 - 27,0

## ●丈の採寸

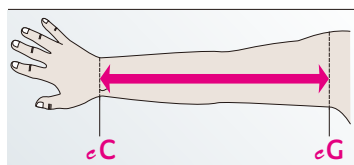

手首から上腕まで

## メディハーモニー

丈 (cm)	ショート丈*	スタンダード丈
eCG	36 - 40	41 - 47

## メディエスプリ

丈 (cm)	ショート丈	ロング丈
eCG	40 - 44	44 - 48

### <メディハーモニーショート丈>

- \*下記の展開のみとなります
- ・スタイル：①スリーブ トップバンド付  
②ミトン付スリーブ トップバンド付
- ・サイズ：SS~LL
- ・カラー：キャメル
- ・ワイドタイプも常時在庫で展開しています

## ご使用について

- ・着用に際しては、必ず医師にご相談ください。
- ・製品に付属する添付文書、およびご使用のしおりもよくお読みください。
- ・製品の仕様、外観は改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。
- ・採寸は各部位の寸法が安定した状態で測定してください。
- ・各圧迫力の数値は、手首部を基準にしていますので、ご注意ください。

## お手入れ方法

- ・液温40℃以下で市販の洗剤を溶かし、洗濯機または手で押し洗いしてください。洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットをご使用ください。
- ・柔軟剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色する場合がありますので、他の洗濯物との混入は避けてください。
- ・ベルクロテープ(マジックテープ)は留めた状態で洗濯してください。

※平成20年3月21日保医発第0321001号等により、一定の要件を満たすことを前提に弾性着衣の購入は療養費支給の対象となりました。詳細は関係省庁や弊社までお問い合わせください。

取扱店

製造販売元：ナック商会株式会社

第1種医療機器 製造販売許可番号 : 27B1X00123  
URL : www.nakcorp.co.jp

■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-13  
(製造販売) tel: 06-6599-9000 fax: 06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-2-8  
tel: 03-5343-7955 fax: 03-5343-7956

お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390  
大阪本社につながります

email : order@nakcorp.co.jp