



# ポケットパッド

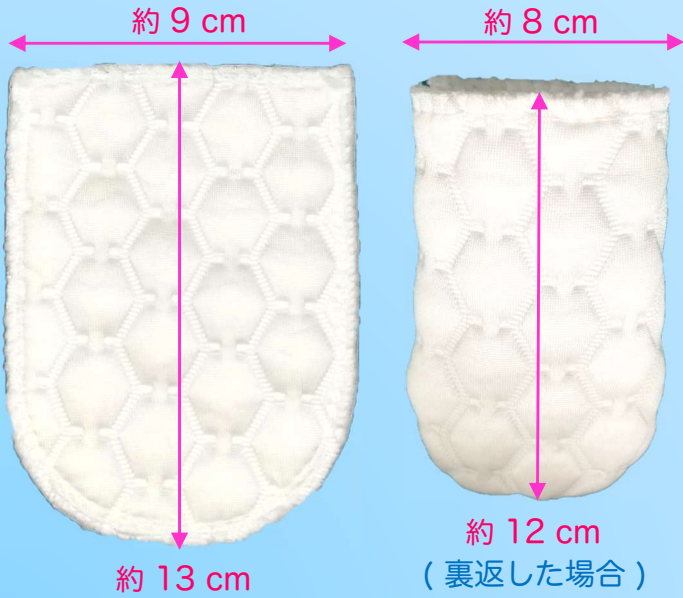

## ■ 足首部に ご使用の場合

※ポケットパッドの丸く閉じた方を挿入したい方向に向け、ストッキング装着途中で差込みます。

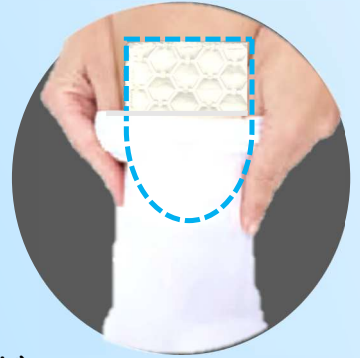

## ■ ポケットパッド

品番	本体価格	税込価格
FPOA-1	¥1,400	¥1,540/1枚
FPOA-2	¥2,700	¥2,970/2枚
FPOA-5	¥5,500	¥6,050/5枚

外側サイズ：約 13cm × 9cm

※ポケットパッドは中表に裏返して使用することもできます。

(同方向2枚重ねのポケット型のため、裏返しても片面に凸部があります。)


※膝裏、鼠径部、手背等生地をあてたい部位にご使用ください。ポケット内に綿をつめてご使用することもできます。

※tgグリップ・tgソフト・アクティコライナー(別売品)等で圧をかけることでより圧迫力をサポートできます。


## 使用例

### ■ 手背部にご使用の場合

※指先だけグローブを装着した状態で手背部分にポケットパッドを配置します。ミトンの場合は中表に裏返し指部分まで着用します。パッドを指で押さえながら、少しずつかぶせるように手首まで着用します。グローブ(ミトン)のシワをのばしながら位置を調整します。

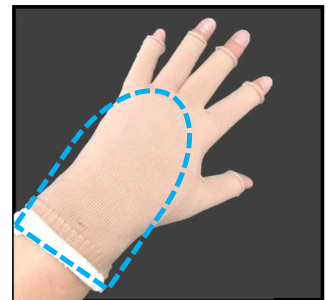


### ■ 鼠径部にご使用の場合

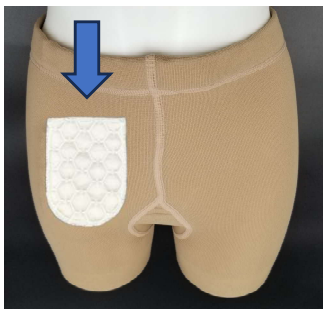

※ポケットパッドの丸く閉じた方を挿入したい方向に向けます。



※ポケット部の中に手を挿入しストッキングの中へパッドを押し込みます。

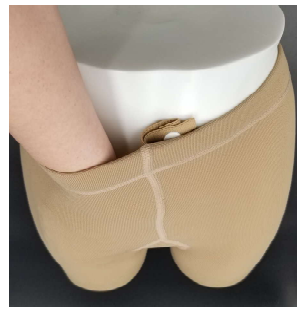

※鼠径部の適切な位置にポケットパッドをおきます。



※ストッキングのシワを伸ばしながら、位置を調整します。