


ジャクスタフィット 大腿用 ご使用のしおり

医療機器届出番号：27B1X00123CAMP01



■装着の手順


レギンス装着前に、レッグライナーを装着してください。
ジャクスタフィット下腿用を併用する場合は、先に下腿用を装着してください。

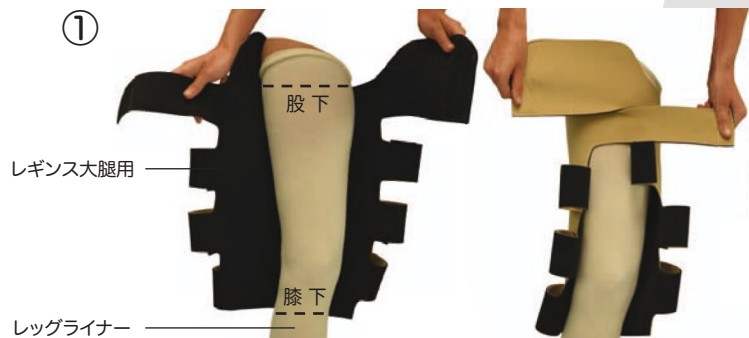

レギンスの黒い方を内側にして、上端を股下に、下端を膝下に合わせます。次に、上2つのバンドを軽く留めます。
※ジャクスタフィット下腿用をご使用の場合は、大腿用の下端が下腿用に重なるように装着します。



下から2つ目までのバンドを留めます。

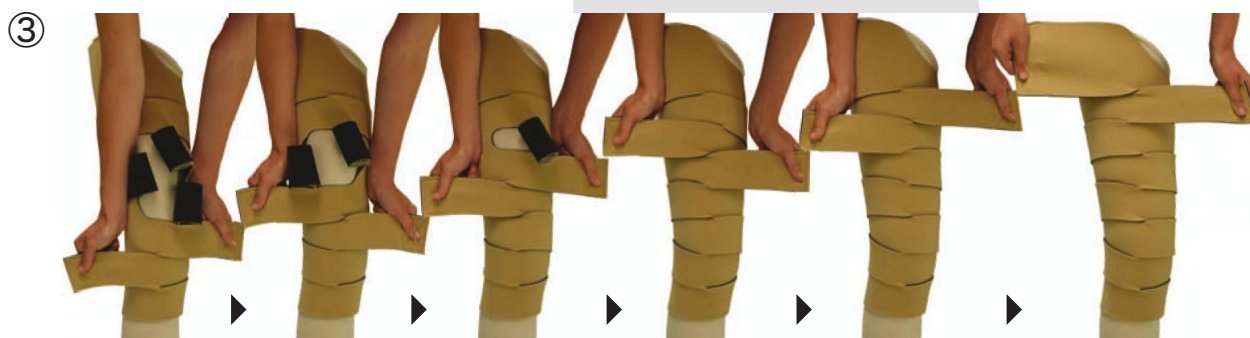

続けて下からバンドを一本ずつ交互に留めていきます。この時、折り目・しわ・隙間ができないように留めます。
※レギンス上部からレッグライナーが出る場合は、バンドを全て留めた後に、レギンス側に折り返してください。



付属のBPSカードの目盛を基準に、各バンドの2本の基準線に合わせ、圧迫力を調整します。

足首周径の値と一致するBPSカードの一边を使用します。
圧迫数値のメモリ内におさまるよう、正しく留め直してください。
圧迫力は、3段階に調整できます。
(20-30mmHg、30-40mmHg、40-50mmHg)
※圧迫力の調整は、医師の指導のもと行ってください。

<例 足首周：15-23cm、圧迫力：30-40mmHg の場合>



30-40mmHgに正しく調整できています。
※30と50の間の白線が、40mmHgを示します。



もう少しキツく締めます。
(20mmHg以下の圧力がかかっています)



キツく締めすぎえています。
(50mmHg以上の圧力がかかっています)

■ニーパッド



ニーパッドを膝にあて、しっかりと適度な圧がかかるように4本のバンドをそれぞれ留めます。膝を少し曲げるとバンドが留めやすくなります。

■カバーアップ

必要に応じてレギンスの上から装着します。

滑かな素材でできているため、レギンスが身体の他の部分を傷つけたり、他の生地をひっかけたりすることを防ぎます。



■内容物

1. レギンス 大腿用 1枚
2. ニーパッド 1枚
3. レッグライナー 2枚
4. カバーアップ 1枚
5. B P S カード 1枚

装着の際の注意

- * 必要な圧迫力は、必ず医師にご相談ください。
- ・ベルクロを中に押し込まないでください。
- ・ベルクロが直接肌に触れないように装着してください。皮膚を傷つける原因となり得ます。

ご使用について

- ・ご使用の際は、必ず医師にご相談ください。
- ・ご使用のしおりのほかに、製品に付属する添付文書をよくお読みください。
- ・製品の仕様、外観は改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
- ・印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。
- ・返品・交換については、商品が未使用の場合には承ります。ただし、商品が未使用であっても、弊社の商品発送日から起算して30日を超えた場合の返品・交換は、いたしかねます。ご了承ください。

※平成20年3月21日保医発第0321001号等により、一定の要件を満たすことを前提に、弾性着衣の購入は療養費支給の対象となりました。詳細は関係省庁や弊社までお問い合わせください。

レギンスの脱ぎ方

- ・レギンスは一番上のバンドから順に外してください。
- ・外したベルクロは折り返して本体に留めてください。

お手入れ方法

- ・水温40℃以下で市販の洗剤を溶かし、洗濯機または手で押し洗いしてください。
- ・洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットをご使用ください。
- ・柔軟剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色・色移りする場合がありますので、他の洗濯物との混入は避けてください。
- ・バンド部分のベルクロ（マジックテープ）は必ず留めた状態で洗濯してください。
- ・カバーアップとレッグライナーはいたみやすい生地のため、単体で手洗いしてください。

製造販売元：ナック商会株式会社

第1種医療機器
製造販売業許可番号：27B1X00123
URL：www.nakcorp.co.jp
e-mail：order@nakcorp.co.jp

■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-1 3
(製造販売) tel：06-6599-9000 fax：06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-2-8
tel：03-5343-7955 fax：03-5343-7956

お客様相談・注文窓口：0120-06-0390